

## **Instrução de Uso – Registro ANVISA 10216839007 : PERFURADOR VALVULADO**

### **Indicação:**

O Perfurador Valvulado GaBmed é um dispositivo indicado para uso em infusão ou aspiração de fluidos sem o auxílio de agulha, para ser fixado em frascos ou bolsa/ frasco de soro.

### **Apresentação:**

O Perfurador Valvulado GaBmed é embalado individualmente em seladora automática, em filme de Polietileno/Nylon e Papel Tyvek. Esterilizado em Óxido de Etileno.

### **Composição:**

<b>Componentes :</b>	<b>Materiais :</b>
(1) Perfurador	Tampa em polietileno; corpo em ABS e Filtro acrílico hidrofóbico 3.0µm antibacteriano para entrada de ar.
(2) Conector Valvulado	Corpo em Policarbonato e Válvula em Silicone

### **Precauções:**

- Conteúdo estéril, apirogênio, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada.
  - Somente para uso único. Descarte após o uso. Não reutilizar.
  - O uso deste produto é restrito ao médico ou profissional qualificado
  - Leia as instruções antes de utilizar o produto. Somente utilizar seguindo as instruções.
  - O fabricante não se responsabiliza por eventuais consequências resultantes do uso impróprio.
  - O produto deve ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.
  - O produto deve ser conservado em ambiente seco e arejado e não exposto ao sol.
  - Este produto é compatível com soluções padrões IV, lipídios, contrastes, sangue e hemoderivados.
  - Observar os procedimentos de controle de infecção apropriados e substituir o produto conforme prática da instituição.
  - O limite de temperatura para armazenamento é de até 40°C.
- Os mesmos cuidados são válidos para o seu transporte, destacando-se a importância da aplicação de Boas Práticas de Armazenagem, para que sua embalagem permaneça intacta, mantendo assim, sua esterilidade. Transporte ou manuseio impróprio pode causar danos estruturais e funcionais ao produto.

**Contra Indicações:** Não se conhece contraindicações no uso deste produto.

### **Instruções de Uso:**

1. Usando técnica asséptica, retirar o produto da embalagem.
2. Retirar a Tampa Protetora do Perfurador
3. Inserir o Perfurador no frasco ou bolsa/ frasco de soro.
4. Nunca acessar o septo do conector valvulado com agulhas ou outros materiais perfuro-cortantes.
5. Antes ou depois de acessar o conector valvulado, fazer limpeza do septo da válvula conforme protocolo da instituição.
6. O septo da válvula suporta até 200 ativações.
7. Substituir este dispositivo conforme protocolo da instituição.

Produto Estéril de Uso Único - Esterilizado utilizando Óxido de Etileno - Látex Free - Manter o produto afastado de luz solar  
Limite de Temperatura de armazenagem de até 40° - Data de Esterilização / Data de Validade / Lote / Registro ANVISA : ver rótulo  
Produzido e distribuído por GaBmed Produtos Específicos Ltda.

Rua Antônio das Chagas, 966 - 04714-001 – São Paulo – SP – Atendimento ao Cliente : (11) 5183-3078 – CNPJ : 68.867.522/0001-29  
Responsável Técnica : Perla F. Fonseca / Coren SP : 202483 - [www.gabmed.com.br](http://www.gabmed.com.br) - Indústria Brasileira.