

## **Instrução de Uso – Registro ANVISA 10216830052 : EXTENSOR C/ TORNEIRA MULTIVALVULADA**

### **Indicação :**

O Extensor com Torneira Multivalvulada GaBmed é indicado para ser conectado a equipamentos de administração IV, cateteres, seringas, etc; a fim de aproximar o paciente ao ponto de origem de infusão.

### **Apresentação:**

O Extensor com torneira multivalvulada GaBmed é fornecido individualmente, esterilizado em Óxido de Etileno, embalado em seladora automática em filme de Polietileno/Nylon e papel Tyvek. Disponíveis nas seguintes configurações:

- Quanto ao número de torneiras: 1;2;3;4 e 5.
- Quanto aos diâmetros externos dos extensores: 6Fr; 8Fr e 12Fr.
- Quanto aos comprimentos dos extensores: 5cm; 10cm; 20cm; 60cm; 90cm; 120cm; 150cm; 10cm e 240cm.

### **Composição:**

<b>Componentes :</b>	<b>Materiais :</b>
(1) Corpo da Torneira	Polycarbonato
(2) Aleta da Torneira	Polietileno de alta densidade
(3) Conectores Luer Lock	PVC rígido
(4) Válvulas	Corpo em policarbonato e válvula em silicone
(5) Tubo extensor	PVC flexível
(6) Tampa protetora	Polietileno de baixa densidade

### **Precauções:**

- Conteúdo estéril/ não Pirogênico a menos que a embalagem esteja aberta ou danificada.
- Somente para uso único. Descarte após o uso, não deve ser reesterilizado.
- O uso deste produto é restrito ao médico ou paramédico qualificado;
- Leia as instruções antes de usar.
- O produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso.
- O fabricante rejeita qualquer responsabilidade por possíveis consequências resultantes de uso impróprio.
- O produto não tóxico, estéril e epirogênico, se a embalagem não estiver aberta ou danificada.
- O produto deve ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.
- Deve ser conservado em ambiente seco e arejado e não exposto ao sol.
- O limite de temperatura para armazenamento é de até 40°C.
- Os mesmos cuidados são válidos para o seu transporte, destacando-se a importância da aplicação de Boas Práticas de Armazenagem, para que sua embalagem permaneça intacta, mantendo assim, sua esterilidade.
- Transporte ou manuseio impróprio podem causar danos estruturais e funcionais ao dispositivo ou a embalagem.

**Contraindicações:** Não se conhece contra indicações para este produto.

### **Instrução de Uso:**

1. Retire o Extensor com torneira multivalvulada de sua embalagem em condições assépticas.
2. Conecte a parte distal luer lock macho do extensor ao acesso do paciente.
3. A parte proximal (torneiras) estará livre para que o profissional conecte seringas, equipamentos, cateteres, etc para a realização das infusões necessárias.
4. As torneiras possuem setas indicadoras de direção do fluxo conforme necessidade de manuseio do profissional.
5. Nunca inserir agulhas nos acessos valvulados.

**Produto Estéril de Uso Único - Esterilizado utilizando Óxido de Etileno - Látex Free - Manter o produto afastado de luz solar  
Limite de Temperatura de armazenagem de até 40° - Data de Esterilização / Data de Validade / Lote / Registro ANVISA : ver rótulo  
Produzido e distribuído por GaBmed Produtos Específicos Ltda.**

**Rua Antônio das Chagas, 966 - 04714-001 – São Paulo – SP – Atendimento ao Cliente : (11) 5183-3078 – CNPJ : 68.867.522/0001-29  
Responsável Técnica : Perla F. Fonseca / Coren SP : 202483 - [www.gabmed.com.br](http://www.gabmed.com.br) - Indústria Brasileira.**