

Instrução de Uso – Registro ANVISA 10216830033 : EXTENSOR GABMED

Indicação :

O Extensor GaBmed é indicado para ser conectado a equipes de administração IV, cateteres, seringas, etc; a fim de aproximar o paciente ao ponto de origem de infusão.

Apresentação :

O produto é fornecido individualmente; Embalado em filme de Polietileno/Nylon e papel Tyvek; Esterilizado em Óxido de Etileno.

O Extensor GaBmed é constituído por um tubo de PVC Flexível, soldado numa das extremidades a um conector Luer Lock Macho c/tampa protetora e soldado na outra extremidade a um conector Luer Lock Fêmea c/tampa protetora; Nas seguintes configurações :

- Extensor c/Diâmetro Externo de 8Fr; nos comprimentos 20cm; 25cm; 30cm; 50cm; 60cm; 76cm; 120cm; 150cm; 240cm
- Extensor c/Diâmetro Externo de 12Fr; nos comprimentos 20cm; 25cm; 30cm; 50cm; 60cm; 76cm; 120cm; 150cm; 240cm

Composição :

Componentes :	Materiais :
(1) Tampa Protetora Fêmea	Polietileno de Baixa Densidade
(2) Conector Luer Lock Macho	PVC (cloreto de Polivinila) Rígido
(3) Tubo Extensor	PVC (cloreto de Polivinila) Flexível
(4) Conector Luer Lock Fêmea	PVC (cloreto de Polivinila) Rígido
(5) Tampa Protetora Macho	Polietileno de Baixa Densidade

Precauções :

- Conteúdo estéril e apirogênico, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada - Somente para uso único.
- O uso deste produto é restrito ao médico ou profissional qualificado.
- Leia as instruções de uso antes de utilizar o produto. Somente utilizar seguindo as instruções.
- O fabricante não se responsabiliza por eventuais consequências resultantes do uso impróprio.
- O produto deve ser utilizado imediatamente após a abertura da embalagem.
- Observar os procedimentos de controle de infecção apropriados e substituir o produto conforme prática da instituição.
- O produto deve ser conservado em ambiente seco e arejado e não exposto ao sol.
- Transporte ou manuseio impróprio pode causar danos estruturais e funcionais ao produto
- O limite de temperatura para armazenamento é de até 40°C. Os mesmos cuidados são válidos para o seu transporte, destacando-se a importância da aplicação de Boas Práticas de Armazenagem, para que sua embalagem permaneça intacta, mantendo assim, sua esterilidade.

Contraindicações : Não se conhece contra indicações para este produto.

Instrução de Uso :

1. Retirar o produto de sua embalagem em condições assépticas.
2. Realizar o preenchimento do sistema (Priming) conforme protocolo da instituição.
3. Conectar a parte Luer Lock Macho do Extensor ao acesso do paciente, após retirada das tampas protetoras.
4. A parte Luer Lock Fêmea do Extensor deve estar disponível para que o profissional opte pela conexão necessária (equipes IV, cateteres, seringas, etc) a fim de aproximar o sistema de infusão ao paciente.

Produto Estéril de Uso Único - Esterilizado utilizando Óxido de Etileno - Látex Free - Manter o produto afastado de luz solar
Limite de Temperatura de armazenagem de até 40° - Data de Esterilização / Data de Validade / Lote / Registro ANVISA : ver rótulo
Produzido e distribuído por GaBmed Produtos Específicos Ltda.

Rua Antônio das Chagas, 966 - 04714-001 – São Paulo – SP – Atendimento ao Cliente : (11) 5183-3078 – CNPJ : 68.867.522/0001-29
Responsável Técnica : Perla F. Fonseca / Coren SP : 202483 - www.gabmed.com.br - Indústria Brasileira.