

Instrução de Uso: EXTENSOR GABMED

REGISTRO ANVISA 10216830033

Indicação:

Extensor GaBmed é indicado para ser conectado a equipamentos de administração IV, cateteres, seringas, etc; a fim de aproximar o paciente ao ponto de origem de infusão.

Apresentação:

O produto é fornecido individualmente, embalado em filme plástico e papel grau cirúrgico.

Esterilizado utilizando Óxido de Etileno.


Produto Descartável de uso único.

O Extensor GaBmed é constituído por um tubo de PVC Flexível, soldado numa das extremidades a um conector Luer Lock Macho c/tampa protetora e soldado na outra extremidade a um conector Luer Lock Fêmea c/tampa protetora; Nas seguintes configurações :

- Extensor c/Diâmetro Externo de 6FR, nos comprimentos: 05cm; 10cm; 20cm; 25cm; 30cm; 40cm; 50cm; 60cm; 76cm; 90cm;120cm; 150cm; 180cm; 240cm.
- Extensor c/Diâmetro Externo de 8FR; nos comprimentos: 05cm; 10cm; 20cm; 25cm; 30cm; 40cm; 50cm; 60cm; 76cm; 90cm;120cm; 150cm; 180cm; 240cm.
- Extensor c/Diâmetro Externo de 12FR, nos comprimentos: 05cm; 10cm;20cm; 25cm; 30cm; 40cm; 50cm; 60cm; 76cm; 90cm;120cm; 150cm; 180cm; 240cm.

Composição:

Componentes:	Materiais:
(1) Tampa Protetora Macho	Polietileno de Baixa Densidade
(2) Conector Luer Lock Fêmea	PVC (cloreto de Polivinila) Rígido
(3) Tubo Extensor	PVC (cloreto de Polivinila) Flexível
(4) Conector Luer Lock Macho	PVC (cloreto de Polivinila) Rígido
(5) Tampa Protetora Fêmea	Polietileno de Baixa Densidade

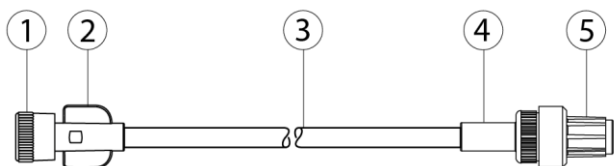

Precauções:

- Conteúdo estéril e apirogênico, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada.
- Somente para uso único. Descarte após o uso.
- O uso deste produto é restrito ao médico ou profissional qualificado.
- Leia as instruções antes de usar. Somente usar de acordo com as instruções.
- O fabricante não se responsabiliza por eventuais consequências resultantes do uso impróprio.
- O produto deve ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.
- O produto deve ser conservado em ambiente seco e arejado e não exposto ao sol.
- Este produto é compatível com soluções padrões IV, lipídios, sangue e hemoderivados.
- Observar os procedimentos de controle de infecção apropriados e substituir o produto conforme prática da instituição.
- Transporte ou manuseio impróprio pode causar danos estruturais e funcionais ao produto.
- O limite de temperatura para armazenamento é de até 40°C. Os mesmos cuidados são válidos para o seu transporte, destacando-se a importância da aplicação de Boas Práticas de Armazenagem, para que sua embalagem permaneça intacta, mantendo assim, sua esterilidade.

Contraindicações: Não se conhece contra-indicações para este produto.

Instrução de Uso:

1. Retirar o produto de sua embalagem em condições assépticas.
2. Realizar o preenchimento do sistema (Priming) conforme protocolo da instituição.
3. Conectar a parte Luer Lock Macho do Extensor ao acesso do paciente, após retirada das tampas protetoras.
4. A parte Luer Lock Fêmea do Extensor deve estar disponível para que o profissional opte pela conexão necessária (equipos IV, cateteres, seringas, etc) a fim de aproximar o sistema de infusão ao paciente.

Regulatórios:

- Biocompatibilidade conforme norma ABNT NBR ISO - 10993.
- Produção em sala controlada conforme norma ABNT NBR ISO-14644 grau "D".
- Conexões Luer Lock conforme norma ABNT NBR ISO - 594.
- Esterilização em Óxido de Etileno conforme norma ABNT NBR ISO - 11135.

Instrução de Uso: EXTENSOR GABMED

REGISTRO ANVISA 10216830033

Rastreabilidade:

Todas as movimentações de estoque, entradas e saídas, são registradas em sistema através do número do lote que relaciona o ciclo de vida do produto na GaBmed. Através do sistema de rastreabilidade que é feita pelo número de lote é possível localizar:

- Código do produto.
- Registros de Entrada: NF; data de entrada; quantidade de peças.
- Peças em Estoque.
- Registros de Saída: NF; cliente; data de saída: quantidade de peças.

O sistema de rastreabilidade também pode ser feito através de relatórios em sistema:

- PA: mostra todos os lotes de produto acabado que consumiram determinados lotes de matéria prima.
- MP: mostra todos os lotes de matéria prima que compõem determinado lote de produto acabado.

Produto Estéril de Uso Único - Esterilizado utilizando Óxido de Etileno - Látex Free - Manter o produto afastado de luz solar.

Limite de Temperatura de armazenagem de até 40° - Data de Esterilização / Data de Validade/ Lote / Registro ANVISA: ver rótulo.

Produzido e distribuído por GaBmed Produtos Específicos Ltda.

Rua Antônio das Chagas, 966 - 04714-001 – São Paulo – SP – Atendimento ao Cliente: (11) 5183-3078 - CNPJ: 68.867.522/0001-29.

Responsável Técnica: Perla F. Fonseca / COREN - SP: 202483 - www.gabmed.com.br - Indústria Brasileira.