

# **Instrução de Uso: EXTENSOR COM TORNEIRA MULTIVALVULADA**

## **REGISTRO ANVISA 10216830052**

### **Indicação:**

O Extensor com Torneira Multivalvulada GaBmed é indicado para ser conectado a equipes de administração IV, cateteres, seringas, etc; a fim de aproximar o paciente ao ponto de origem de infusão.

### **Apresentação:**

O Extensor com torneira multivalvulada GaBmed é fornecido individualmente, embalado em filme plástico e papel grau cirúrgico.

Esterilizado utilizando Oxido de Etileno.

Produto Descartável de uso único.

Nas seguintes configurações:

- Quanto ao número de torneiras: 1 torneira, 2 torneiras, 3 torneiras, 4 torneiras e 5 torneiras.
- Quanto aos diâmetros externos dos extensores: 6Fr, 8Fr e 12Fr.
- Quanto aos comprimentos dos extensores: 5 cm; 10 cm; 20 cm; 60 cm; 90 cm; 120 cm; 150 cm; 180 cm e 240 cm.

### **Composição:**

Componentes:	Materiais:
(1) Corpo da Torneira	Polycarbonato
(2) Aleta da Torneira	Polietileno de alta densidade
(3) Conectores Luer Lock	PVC rígido
(4) Válvula da Torneira	silicone
(5) Tubo extensor	PVC flexível
(6) Tampa protetora	Polietileno de baixa densidade

### **Precauções:**

- Conteúdo estéril e apirogênico, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada.
- Somente para uso único. Descarte após o uso.
- O uso deste produto é restrito ao médico ou profissional qualificado.
- Leia as instruções antes de usar. Somente usar de acordo com as instruções.
- O fabricante não se responsabiliza por eventuais consequências resultantes do uso impróprio.
- O produto deve ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.
- O produto deve ser conservado em ambiente seco e arejado e não exposto ao sol.
- Este produto é compatível com soluções padrões IV, lipídios, sangue e hemoderivados.
- Observar os procedimentos de controle de infecção apropriados e substituir o produto conforme prática da instituição.
- Transporte ou manuseio impróprio pode causar danos estruturais e funcionais ao produto.
- O limite de temperatura para armazenamento é de até 40°C. Os mesmos cuidados são válidos para o seu transporte, destacando-se a importância da aplicação de Boas Práticas de Armazenagem, para que sua embalagem permaneça intacta, mantendo assim, sua esterilidade.

**Contraindicações:** Não se conhece contraindicações para este produto.

### **Instrução de Uso:**

1. Retire o Extensor com torneira multivalvulada de sua embalagem em condições assépticas.
2. Conecte a parte distal luer lock macho do extensor ao acesso do paciente.
3. A parte proximal (torneiras) estará livre para que o profissional conecte seringas, equipos, cateteres, etc para a realização das infusões necessárias.
4. As torneiras possuem setas indicadoras de direção do fluxo conforme necessidade de manuseio do profissional.
5. Nunca inserir agulhas nos acessos valvulados

### **Regulatórios:**

- Biocompatibilidade conforme norma ABNT NBR ISO - 10993.
- Produção em sala controlada conforme norma ABNT NBR ISO-14644 grau "D".
- Conexões Luer Lock conforme norma ABNT NBR ISO - 594.
- Esterilização em Óxido de Etileno conforme norma ABNT NBR ISO - 11135.

### **Rastreabilidade:**

Todas as movimentações de estoque, entradas e saídas, são registradas em sistema através do número do lote que relaciona o ciclo de vida do produto na GaBmed. Através do sistema de rastreabilidade que é feita pelo número de lote é possível localizar:

- Código do produto.
- Registros de Entrada: NF; data de entrada; quantidade de peças.
- Peças em Estoque.
- Registros de Saída: NF; cliente; data de saída: quantidade de peças.

O sistema de rastreabilidade também pode ser feito através de relatórios em sistema:

- PA: mostra todos os lotes de produto acabado que consumiram determinados lotes de matéria prima.
- MP: mostra todos os lotes de matéria prima que compõem determinado lote de produto acabado.

**Instrução de Uso: EXTENSOR COM TORNEIRA MULTIVALVULADA**  
**REGISTRO ANVISA 10216830052**

*Produto Estéril de Uso Único - Esterilizado utilizando Óxido de Etileno - Látex Free - Manter o produto afastado de luz solar.*  
*Limite de Temperatura de armazenagem de até 40° - Data de Esterilização / Data de Validade/ Lote / Registro ANVISA: ver rótulo.*  
*Produzido e distribuído por GaBmed Produtos Específicos Ltda.*  
*Rua Antônio das Chagas, 966 - 04714-001 – São Paulo – SP – Atendimento ao Cliente: (11) 5183-3078 - CNPJ: 68.867.522/0001-29.*  
*Responsável Técnica: Perla F. Fonseca / COREN - SP: 202483 - www.gabmed.com.br - Indústria Brasileira.*